



HPA SK s.r.o.

Distribútor pre Slovenskú republiku

Katalógové číslo DNK-2105-1
Vyvinuté spoločne s Inštitútom Biológie
Patogénov, Čínska akadémia zdravotných vied

Registrovaná Diagnostická zdravotnícka pomôcka COVID-19 In Vitro



COVID-19 TEST ZA 10 minút

1 Test, 20 Testov/balenie

Pohodlné a bezpečné testovanie

Dynamiker SARS-CoV-2 Ag Rýchlo Test (zo slín)

- Rýchly - Presný - Spoľahlivý


1 Účel použitia

Rýchlo test Dynamiker SARS-CoV-2 Ag (zo slín), laterálny test určený ku kvalitatívnej detekcii antigénu nukleokapsidového proteínu zo SARS-CoV-2 v slinách od osôb podozrivých z COVID-19. Určené pre použitie laickou verejnosťou pre samo testovanie.


2 Špecifikácia

Špecifikácia	20 testov v balení / 1 test	Použitie pre:	Kvalitatívna detekcia antigénu nukleokapsidového proteínu z SARS-CoV-2 v slinách od osôb podozrivých z COVID-19
Metóda	Imunochromatografie koloidného zlata	Skladovanie a preprava:	2-30 °C
Vzorka	Nasofaryngeálny / orofaryngeálny / sliny	Doba výsledku:	10 minút


3 Diagram použitia

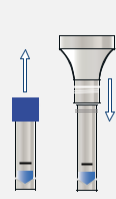


1 Otvorte trubicu extrakčnej nádoby. Našrobujte lievik pre odber zo slín na trubicu nádoby.




2 Naplňte do lievika a získajte objem až po rysku 1 ml (pufor + sliny).

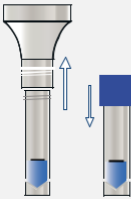


3 Zložte lievik a potom riadne uzavrite trubicu nádoby modrým viečkom; Skúmavku pretrepte tak, Aby ste premiešali nádobu a sliny.

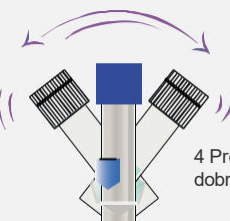

4 Pretrepte a dobre premiešajte.

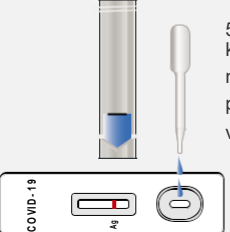

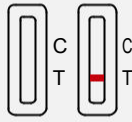


5 Položte testovaciu kazetu na rovný a čistý povrch; pipetou pridajte 2 kvapky vzorku zmesi slín.

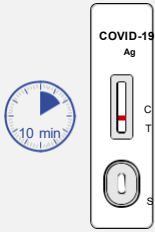

6 Odčítajte a zaznamenajte výsledky po 10 minútach (nie dlhšie ako 20minút)
Po 20 minútach sa môžu objaviť nesprávne výsledky

4 Interpretácia výsledkov

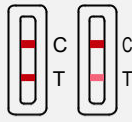Pozitívny		Prítomnosť dvoch červených línií, testovacej línie (T) a kontrolnej línie (C), indikuje prítomnosť antigénu nukleokapsidového proteínu SARS-CoV-2.
Negatívny		Vzhľad jedinej kontrolnej línie (C), žiadna červená testovacia línia (T), indikuje neprítomnosť antigénu nukleokapsidového proteínu SARS-CoV-2 vo vzorke.
Neplatný		Nezobrazuje sa žiadna červená kontrolná čiara (C). Neplatné výsledky môžu byť spôsobené nesprávnou obsluhou alebo stratou účinnosti testu z dôvodu kontaminácie. Test opakujte.

Dovozca & Distribútor:

HPA SK s.r.o.

Štúrova 30, 949 01 Nitra

Tel.: +421915410555

Tel.: +421917222622

www.4beauty.sk

e-mail: 4beauty@4beauty.sk